

# Disinfezione delle superfici & dispositivi medicali

Salviette per la **disinfezione e pulizia di sonde ecografiche** (efficaci anche su Covid in 30 secondi), disinfezione di **dispositivi medici** contro Covid, salviette per disinfettare e sanificare **smartphone, telefono** e panni per la sanificazione di **mezzi di soccorso e terapia intensiva**.



**Normeditec**

# Agenda

Le nostre soluzioni per la disinfezione delle superfici.

Salviette pronte all'uso e già imbibite di disinfettante:

- **Descosept Sensitive Wipes**
- **Cleanisept Wipes**
- **Cleanisept Wipes FORTE**

Sistema di panni asciutti con dispenser:

- **Desco/Eco Wipes**



# DESCOSEPT SENSITIVE WIPES



## Descrizione prodotto

Salviette pronte all'uso imbevute di **disinfettante a base alcolica** per la disinfezione e pulizia di dispositivi medici e superfici sensibili.

## Attive contro il Coronavirus in soli 30 secondi !

## Campo di applicazione

Secondo quanto previsto dal **Regolamento UE sui dispositivi medici**, le salviette tipo Descosept Sensitive Wipes sono indicate per una rapida disinfezione e pulizia di dispositivi medici non invasivi (termometri, monitor touch di dispositivi per il monitoraggio, dispositivi medicali in generale etc).

Secondo quanto previsto dal **Regolamento sui biocidi (BPR)**, le salviette tipo Descosept Sensitive Wipes sono indicate per una disinfezione e pulizia rapide dell'inventario medico resistente all'alcool e di tutti i tipi di superfici (tastiere pc, schermo pc, monitor touch, telecomandi, smartphone, etc.)

Descrizione	Misura	Confezionamento	Codice Prodotto
Descosept Sensitive wipes	20 x 22 cm	100 salviette/confezione 6 confezioni/scatola	00-323DS-T100

itec

# DESCOSEPT SENSITIVE WIPES

## Applicazioni

Le salviette Descosept Sensitive Wipes sono indicate per la pulizia e disinfezione di:

- Tastiere del pc
- Mouse
- Cercapersona
- Monitor del pc
- Monitor touch di dispositivi medici
- Monitor di laringoscopi per intubazione
- Telecomandi
- Termometri
- Smartphone
- Superfici di ogni tipo non sensibili all'alcool



**Normeditec**

# CLEANISEPT WIPES



## Descrizione prodotto

Salviette alcool-free pronte all'uso e imbevute di **disinfettante a base di ammonio quaternario** per la disinfezione e pulizia di sonde ecografiche e superfici di ogni tipo sensibili all'alcool.

**Particolarmente indicate per la pulizia e disinfezione di sonde ecografiche.**

**Attive contro il Coronavirus in soli 30 secondi !**

## Contenuto

Ogni confezione contiene 100 salviette (20 x 22 cm) preimbevute di disinfettante. 100 g di soluzione disinfettante Cleanisept contiene:

- 0,25 g didecil dimetil ammonio cloruro
- 0,5 g alchil (C12-16) dimetil benzilammonio cloruro

Particolarmente indicate per la pulizia e disinfezione delle **SONDE ECOGRAFICHE**

Le Cleanisept Wipes sono studiate e approvate per la pulizia delle sonde ad ultrasuoni e raccomandate dalle seguenti aziende produttrici: **Aloka, Esaote, GE, Hitachi Medical Systems, Philips, Shimadzu, Siemens Medical Solutions, SonoAce, SonoSite, Toshiba, Zonare Medical Systems.**

Descrizione	Misura	Confezionamento	Codice Prodotto
Cleanisept wipes MAXI	20 x 22 cm	100 salviette/confezione 6 confezioni/scatola	00-208-T100

# CLEANISEPT WIPES



## Applicazioni

Le salviette Cleanisept Wipes sono indicate per la pulizia e disinfezione di:

- Sonde Ecografiche
- Testine delle sonde ad ultrasuoni per esami vaginali, addominali, fibroscopi flessibili per diagnostica
- Superfici in plexiglass (barriere, separatori, visiere..)
- Holter cardiaco, pressorio, ecg e relativi accessori
- Cavi di ogni tipo
- Maniglie e superfici tubolari
- Sedie a rotelle
- Poltrone
- Superfici di ogni tipo sensibili all'alcool

**Normeditec**

# CLEANISEPT WIPES

## Applicazioni

## SONDE ECOGRAFICHE



***La corretta pulizia delle sonde ecografiche effettuata con Cleanisept aiuta a prolungarne la vita, in quanto l'uso della comune carta per togliere il gel provoca graffi alle sonde stesse e porta ad una drastica riduzione del tempo di vita del dispositivo.***

*Per garantire la salute del paziente e l'integrità delle sonde raccomandiamo l'uso di Cleanisept Wipes per la disinfezione routinaria delle sonde e dopo ogni utilizzo. Ciò assicura un'efficace pulizia e disinfezione della sonda, compresa l'eliminazione di tutti i patogeni clinicamente rilevanti (compreso SARS-CoV-2) e garantisce un più sicuro utilizzo dello strumento. Diversi studi hanno dimostrato che non è sufficiente utilizzare coperture monouso o condoms poiché essi non sono sufficienti ad evitare contaminazioni ed infezioni a causa del loro alto grado di permeabilità<sup>1</sup>.*

Le salviette sono particolarmente facili da usare, economiche e possono essere rapidamente integrate nella quotidiana routine di lavoro. Pertanto, mediante l'utilizzo di Cleanisept® Wipes, è possibile realizzare un immediato e significativo aumento dello standard igienico in tutti reparti ospedalieri ed ambulatoriali, specialmente dove vengono utilizzate le sonde ad ultrasuoni.

**Normeditec**

# CLEANISEPT WIPES FORTE

## Descrizione prodotto

Salviette alcool-free pronte all'uso per la disinfezione **sporicida e virucida** e la pulizia di superfici e prodotti medicali quali, ad esempio, **le sonde (TEE) ad ultrasuoni per esami transvaginali e addominali**.

## Attive contro il Coronavirus in soli 30 secondi !

## Contenuto

Ogni confezione contiene 100 salviette (20 x 22 cm) preimbevute di disinfettante. 100 g di soluzione disinfettante contiene i seguenti principi:

- 0,4 g di cloruro di alchil (C12-16) dimetilbenzilammonio
- 0,2 g di cloruro di didecildimetilammonio

Proprietà antimicrobiche:

- **sporicida (Clostridium difficile)**
- battericida (incluso MRSA)
- fungicida
- virucida

Particolarmente indicate per la pulizia e disinfezione delle **SONDE TRANSESOFAGEE (TEE)**



Descrizione	Misura	Confezionamento	Codice Prodotto
Cleanisept wipes FORTE MAXI	20 x 22 cm	100 salviette/confezione 6 confezioni/scatola	00-235-T100





# CLEANISEPT WIPES FORTE

## Applicazioni



Le salviette Cleanisept Wipes FORTE sono indicate per la pulizia e disinfezione di:

- Sonde Transesofagee (TEE)
- Sonde ad ultrasuoni per le ecografie transvaginali e addominali.
- Superfici sporche che necessitano di una pulizia profonda

**Normeditec**

# DESCO/ECO WIPES



## Descrizione prodotto

**Problema** - una adeguata disinfezione delle superfici in ambito ospedaliero è il nodo cruciale per affrontare batteri e virus sempre più aggressivi. La disinfezione tramite nebulizzatori non garantisce un'asetticità uniforme sulle superfici trattate. **Infatti la quantità di disinfettante dipende da ogni singolo operatore e dal numero degli "spruzzi" usati per pulire le superfici.**

**Il risultato quindi può essere una disinfezione non omogenea.**

**Soluzione** - con il sistema Desco/Eco Wipes si garantisce sempre lo stesso livello di disinfezione: ogni panno viene imbevuto in modo omogeneo con la stessa quantità di disinfettante in modo tale da assicurare sempre un ottimo livello di disinfezione. Ogni panno viene utilizzato una sola volta per evitare infezioni crociate da una superficie ad un'altra.

Desco/Eco Wipes può essere usato con **tutti i disinfettanti disponibili sul mercato, ovviamente anche quelli efficaci contro il Coronavirus.**

## Vantaggi del sistema DESCO/ECO Wipes

- **disinfezione uniforme su superfici e parti difficili da raggiungere** (maniglie, cavi, superfici tubolari di barelle.)
- **si evita il rischio di inalazione del disinfettante per gli operatori**
- **il sistema può essere utilizzato con qualsiasi disinfettante in commercio e diluito secondo gli attuali protocolli**
- salviette pretagliate e pronte all'uso
- sistema di panni con dispenser comodo da usare (un solo oggetto in mano!)
- personalizzazione del livello di imbibizione delle salviette

Descrizione	Misura	Confezionamento	Codice Prodotto
Ricarica Eco wipes	32 x 30 cm	6 rotoli da 100 panni/scatola	<b>00-915-REW10006</b>
Ricarica Eco wipes	32 x 30 cm	3 rotoli da 50 panni/scatola	<b>00-915-REW5003</b>
Dispenser senza panni	5 Litri	Singolo/riutilizzabile	<b>00-915-SE002</b>
Dispenser senza panni	3 Litri	Singolo/riutilizzabile	<b>00-915-SKD002</b>

# DESCO/ECO WIPES

## Applicazioni

Il sistema di panni asciutti DESCO/ECO Wipes è indicato per la pulizia e la disinfezione di:

- Tavoli, superfici in acciaio, lettini operatori
- Poltrone, carrozzine, sedie
- Maniglie delle porte e delle portiere
- Superfici tubolari di ogni tipo
- Banconi e scrivanie
- Mezzi di soccorso, ambulanze
- Legno
- Ogni tipo di superficie



**Normeditec**

# Grazie!

**Per ulteriori informazioni**  
scriveteci a [info@normeditec.com](mailto:info@normeditec.com) o visitate il nostro sito internet [www.normeditec.com](http://www.normeditec.com)

**NORMEDITEC S.R.L.**  
Via De Gasperi 19 43018, Sissa Trecasali  
Tel.0521 878 949 Tel.348 730 2445 – 331 185 9110 Fax.0521 363 731  
[www.normeditec.com](http://www.normeditec.com) [info@normeditec.com](mailto:info@normeditec.com)

